

VI 190222

ANLEITUNG Einzel-Lolli- PCR-Test

English manual: www.kita-lollitest.de/english.pdf
 Instructions en français: www.kita-lollitest.de/francais.pdf
 Polskie instrukcje: www.kita-lollitest.de/polskie.pdf
 türkçe talimat: www.kita-lollitest.de/tuerk.pdf
 русская инструкция: www.kita-lollitest.de/russkaya.pdf

- ① Bitte überprüfen Sie zunächst, ob der **Name auf dem Aufkleber des Teströhrchens** mit dem **Namen Ihres Kindes** übereinstimmt. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihre Kita, um ein neues Teströhrchen zu bekommen.


Notieren Sie die 10-stellige Auftragsnummer vom Aufkleber des Teströhrchens hier:



! Der Barcode-Aufkleber auf dem Teströhrchen darf nicht verändert werden !

- ② **Testdurchführung**
 ! Die **Probennahme sollte bei Ihrem Kind morgens direkt nach dem Aufstehen (vor dem Frühstück oder Zähneputzen!) erfolgen !**

Entnehmen Sie den Wattetupfer an der Pfeilkennzeichnung aus der sterilen Verpackung. **Bitte achten Sie darauf, dass Sie den Wattekopf nicht berühren!** Lassen Sie ihr Kind **am Wattetupfer 30 Sekunden lang intensiv lutschen** (Wattestäbchen im Mund hin- und her bewegen, oben und unten, rechts und links).

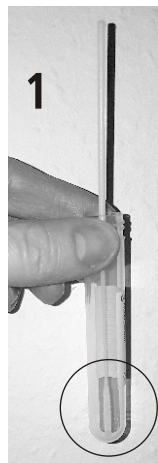

Stecken Sie nun das Wattestäbchen mit dem **Wattekopf nach unten** in das Probenröhrchen, **brechen** Sie das **Kunststoffstäbchen** an der Sollbruch-Stelle ab (abgebrochenes Stück wegwerfen) und **verschließen** dann **das Probenröhrchen** fest mit dem Dreh-Deckel.



- ③ Geben Sie das Probenröhrchen **bis spätestens 09:00 Uhr in der Kita ab**. Ein Kurierdienst bringt das Röhrchen von der Kita zur Analyse ins Labor!

- ④ Direkt nach Auswertung der Probe erhalten Sie vom Labor eine **email/SMS** über das Ergebnis. Unter folgendem Link können Sie unter Angabe der **Auftragsnummer**, des **Geburtsdatum Ihres Kindes** und der **PLZ** beim Labor das Ergebnis der Analyse abfragen und auch ein **Zertifikat über das Testergebnis** (positiv/negativ) generieren:

<https://aachen.corona-ergebnis.de/>

Die **Befund-Hotline** des Labors erreichen Sie unter **02405-48910** montags bis freitags von **8-19 Uhr**.

