

## Инструкции Lollі ПЦР-тест

- 1** Во-первых, убедитесь, что имя на наклейке с пробиркой совпадает с именем вашего ребенка. Если это не так, обратитесь в детский сад, чтобы получить новую пробирку.

Запишите 10-значный номер заказа с этикетки пробирки здесь:




! Наклейка со штрих-кодом на пробирке не должна быть изменена !

- 2** **ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТА**  
Пробу следует брать у ребенка утром сразу после пробуждения (перед завтраком или чисткой зубов!).

Выньте ватный тампон из стерильной упаковки по стрелке.

**Будьте осторожны, не прикасайтесь к ватной головке!**

Дайте ребенку интенсивно пососать ватный тампон в течение 30 секунд (подвигайте ватным тампоном во рту вперед-назад, вверх-вниз, влево-вправо).

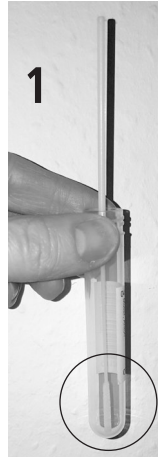

Теперь вставьте ватный тампон ватной головкой вниз в пробирку с образцом, отломите пластиковый тампон в заданном месте разрыва (выбросьте сломанный кусок), а затем плотно закройте пробирку с образцом завинчивающейся крышкой.



- 3** Сдайте пробирку для образца в детский сад не позднее 9:00 утра. Курьерская служба доставляет пробирку из детского сада в лабораторию для анализа!

- 4** Сразу после оценки образца вы получите электронное письмо/SMS от лаборатории о результате. По следующей ссылке вы можете запросить результат анализа в лаборатории, а также сформировать справку о результате анализа (положительный/отрицательный), указав номер заказа, дату рождения вашего ребенка и почтовый индекс:

<https://aachen.corona-ergebnis.de/>

