

Talimatlar Lolli PCR testi

- 1** Öncelikle lütfen test tüpü etiketindeki ismin çocuğunuzun adıyla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Durum böyle değilse, yeni bir test tüpü almak için lütfen gündüz bakım merkezinizle iletişime geçin.

10 haneli siparis numarasını not edin buradaki test tüpünün etiketinden:




! Test tüpü üzerindeki barkod etiketi değiştirilmemelidir !

- 2** **Test uygulaması**
! Numune çocuğunuzdan sabah kalktıktan hemen sonra (kahvaltıdan veya diş fırçalamadan önce) alınmalıdır !


Pamuklu çubuğu steril ambalajından ok işaretiyle çıkarın.

Lütfen pamuklu kafaya dokunmamaya dikkat edin!

Çocuğunuzun pamuklu çubuğu **30 saniye** boyunca yoğun bir şekilde emmesine izin verin (pamuklu çubuğu ağzında ileri geri, yukarı ve aşağı, sola ve sağa hareket ettirin).

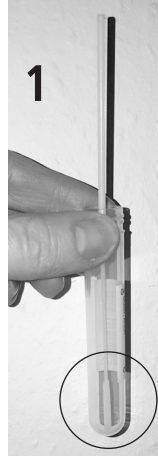

Şimdi pamuklu çubuğu, pamuklu başı aşağı gelecek şekilde numune tüpüne yerleştirin, plastik çubuğu önceden belirlenen kırılma noktasından ayırın (kırık parçayı atın) ve ardından numune tüpünü vidalı kapakla sıkıca kapatın.

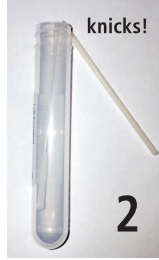

- 3** Numune tüpünü en geç saat **9:00**'a kadar gündüz bakımına teslim edin. Bir kurye servisi, tüpü analiz için kresten laboratuvara getirir!

- 4** Numuneyi değerlendirdikten hemen sonra laboratuvardan sonuçla ilgili bir **e-posta/SMS** alacaksınız. Aşağıdaki bağlantı altında laboratuvardan analiz sonucunu talep edebilirsiniz ve ayrıca sipariş numarası, çocuğunuzun doğum tarihi ve posta kodunu belirterek test sonucunun (pozitif/negatif) bir belgesini oluşturabilirsiniz:

<https://aachen.corona-ergebnis.de/>

Laboratuvarın yardım hattına 02405-48910
Pazartesi'den Cumaya 08:00-19:00 saatleri arasında
ulaşabilirsiniz.

